

BIOCHETASI

REFLUSSO

Soluzione orale

20 stick monodose da 10 ml

Dispositivo medico

Aroma Arancia

Senza glutine

Riduce rapidamente i sintomi di piroisi gastrica (bruciore di stomaco), dolore epigastrico (sensazione dolorosa nell'area centro-superiore dell'addome) e rigurgito acido, proteggendo la mucosa esofagea.

Indicazioni:

Biochetasi Reflusso è un dispositivo medico brevettato* ad azione meccanica che consente di ridurre rapidamente i sintomi correlati al reflusso gastro-esofageo quali: piroisi gastrica (bruciore di stomaco), dolore epigastrico (sensazione dolorosa nell'area centro-superiore dell'addome), rigurgito acido, tosse irritativa, disfonia.

Meccanismo d'azione:

Biochetasi Reflusso grazie alla sua formulazione brevettata crea un film protettivo persistente che protegge la mucosa esofagea dall'aggressione degli agenti irritativi (es. acido gastrico).

Composizione:

Chondroitin solfato sodico (*origine suina*), xiloglucano da tamarindo, glicerina vegetale, xilitolo, idrossi-propil-metil-cellulosa, acqua depurata, sorbato di potassio, benzoato di sodio, aroma, acido citrico, bicarbonato di sodio, gomma di xanthan.

Posologia e Modo d'uso:

Assumere il contenuto di una bustina dopo i pasti principali e al momento di coricarsi, o secondo consiglio medico.

Avvertenze:

Il dispositivo è confezionato in pratici stick monodose appositamente dosati per gli adulti.

Non assumere se ipersensibili o allergici ad uno dei componenti.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Una volta aperto lo stick assumerne tutto il contenuto.

Sebbene non si conoscano effetti collaterali, si consiglia di non utilizzare il prodotto in gravidanza o durante l'allattamento. In ogni caso consultare il proprio medico.

In caso di concomitante terapia farmacologica, consultare il proprio medico prima dell'assunzione.

Non utilizzare nel caso in cui il confezionamento non si presenti integro.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare nella confezione originale a temperatura ambiente in luogo fresco ed asciutto

INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DOPO L'USO

MATERIALE	CODICE	RACCOLTA
Astuccio	PAP 21	Carta
Foglietto illustrativo	PAP 22	Carta
Bustina	C/LDPE 90	Plastica

Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo comune

*(brevetto Italiano n. IT1020270008526 depositato il 28-09-2017 e brevetto Europeo num. EP 1898876B1 depositato il 01-06 2006)

Revisione: Gennaio 2021



Labomar S.p.A., Via N. Sauro 35 I, Istrana (TV) Italy

Distributore: Alfasigma S.p.A., Via Ragazzi del '99, n.5 – 40133 Bologna (BO) Italy

